

AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE

Descripción del producto

- Dispositivo médico estéril diseñado para penetrar sin dañar al tejido permitiendo la entrada o salida de sustancias al organismo en cualquier parte del cuerpo humano en conjunto con una jeringa y/o cualquier otro dispositivo.
- Presentación en blister individual estéril.

Características generales

- Casquillo de inserción con la jeringa de polipropileno translúcido con un color que ayuda a identificar el calibre o diámetro de la aguja.
- Tubo metálico de acero inoxidable y recubierto con una capa de silicona que hace que la inserción al organismo sea más suave, además reduce las probabilidades de coagulación.
- Corte oblicuo en el borde en bisel con un filo que garantiza una buena inserción.
- Pieza protectora de forma cilíndrica para proteger la aguja hipodérmica, acoplándose en su parte superior con el casquillo de inserción con la jeringa, quedando fijada y protegida. Esta parte evita posibles daños en el bisel o en la aguja, a la vez que posibles pinchazos.
- Libre de látex y ftalatos.
- Certificado CE0123, directiva MDD 93/42/EEC.
- Clasificación clase IIa.



Precauciones y advertencias

- Producto de un solo uso.
- Seleccionar el número de la aguja correctamente antes de su uso. Prestar atención al color de la base de la aguja para distinguir fácilmente.
- Una vez abierto, utilizar inmediatamente.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo.

Instrucciones de uso

- Este producto debe ser utilizado por un médico o profesional cualificado.
- Retirar la aguja de su embalaje estéril individual, unir a la jeringa o dispositivo al cual deba anclarse, con cuidado para evitar contaminación y verificar que la conexión es resistente.
- Retirar la tapa protectora, absorber la solución, expulsar el aire del interior de la jeringa e inyectar.

Condiciones de almacenaje y transporte

- El producto debe protegerse de la presión, luz solar directa, lluvia y nieve durante el transporte.
- Se debe almacenar en un entorno ventilado, seco y sin gases corrosivos.
- Mantener alejado de fuentes de fuego e inflamables.

Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

COLK00031

Aguja Hipodérmica 18 G x 1 ½ " Desechable. Estéril.

100 UDS. POR CAJA 100 CAJAS POR EMBALAJE

COLK00032

Aguja Hipodérmica 21G x 1 ½ " Desechable. Estéril.

100 UDS. POR CAJA 100 CAJAS POR EMBALAJE

COLK00033

Aguja Hipodérmica 23G x 1" Desechable. Estéril.

100 UDS. POR CAJA 100 CAJAS POR EMBALAJE

COLK00034

Aguja Hipodérmica 30G x 1 ½ " Desechable. Estéril.

100 UDS. POR CAJA 100 CAJAS POR EMBALAJE