

BOLSA RECOGIDA ORINA PEDIÁTRICA 100ML

Descripción del producto

- Bolsa de orina estéril para recogida de muestras de orina.
- Para uso en pediatría.
- Diseñado para uso clínico de recolección de orina de pacientes.
- Superficie de la bolsa lisa, no vetecada, sin manchas.
- Soldadura de unión resistente. Impresión nítida.

Características generales

- Bolsa para recolección de orina pediátrica.
- Con adhesivo de seguridad.
- Bolsa de PVC transparente con abertura.
- Capacidad: 100 ml.
- Espesor del cuerpo de la bolsa, doble capa de 0,09mm.
- Longitud 230mm.
- Ancho 80mm.
- Esterilización OE.
- No contiene látex.
- Envase unitario estéril.
- Certificado CE0123, directiva MDD 93/42/EEC.
- Clasificación clase IIa.



Precauciones y advertencias

- Para un solo uso.
- No presionar con fuerza.
- No utilizar como instrumento de medida.
- La muestra de orina debe ser conservada a 4°C (en la nevera) hasta su análisis.
- No utilizar en neonatos.
- No utilizar en Unidades de Cuidados Intensivos.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo

Instrucciones de uso

- Limpiar bien la zona.
- Mantenga la piel seca.
- Sacar la bolsa de orina del envase.
- Sacar el papel protector del adhesivo.
- En niños, introducir el pene por la abertura de la bolsa y presionar suavemente alrededor.
- En niñas, cubrir la parte superior de los genitales y presionar suavemente alrededor.
- Comprobar cada 30 minutos.
- Al retirar la bolsa, doblarla por la mitad del adhesivo, para cerrarla herméticamente.

Condiciones de almacenaje y transporte

- Almacenar en lugar limpio, fresco y seco, lejos de fuentes de calor y de luz.
- Con una humedad relativa no superior al 80% y libre de gases corrosivos,

Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando, se cumplan las condiciones de almacenamiento.

COLK00025

Bolsa de Recogida de Orina Pediátrica 100ml.
Estéril

100 UDS. POR BOLSA 50 BOLSAS POR EMBALAJE