

CATÉTER NELATON

Descripción del producto

- Este dispositivo médico desechable posee varios usos clínicos: se utiliza para drenar orina en un cateterismo vesical, permite durante la cirugía aspirar secreciones en zonas pequeñas y de difícil acceso y protege las puntas del instrumental quirúrgico.
- Estéril.

Características generales

- El catéter Nelaton es de 40cm para hombre (hay la posibilidad de pedirlo en 20cm para mujer).
- Está fabricado en PVC de grado médico, no tóxico, no irritante y suave. Libre de látex.
- El tubo tiene un acabado esmerilado y los conectores tienen un código de color para facilitar su identificación.
- No lleva marcador de rayos X.
- Extremo distal cerrado con 2 orificios laterales. Certificado 93/42/EEC.
- Clasificación clase IIa.

Precauciones y advertencias

- Este material es exclusivamente de un solo uso y debe desecharse tras ser utilizado.
- La re-esterilización está estrictamente prohibida.
- No utilizar si el envase está abierto o dañado.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- La reutilización de este material puede producir reinfecciones o infecciones cruzadas

Instrucciones de uso

- Extraer el catéter de su envase estéril.
- Elegir el catéter con las especificaciones necesarias.
- Inserte el tubo a través de la uretra hasta la vejiga.
- Utilizar pinzas hemostáticas estériles para sujetar el catéter.
- Introducir el catéter suavemente en el conducto urinario hasta la vejiga y drenar la orina.

Condiciones de almacenaje y transporte

- El entorno de almacenamiento debe mantenerse seco y alejado de la luz solar.
- El material debe transportarse y manipularse con cuidado

Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.



COLK00019

Catéter Nelaton 40cm. Estéril. Fr8.

100 UDS. POR CAJA 6 CAJAS POR EMBALAJE

COLK00020

Catéter Nelaton 40cm. Estéril. Fr10.

100 UDS. POR CAJA 6 CAJAS POR EMBALAJE

COLK00021

Catéter Nelaton 40cm. Estéril. Fr12.

100 UDS. POR CAJA 6 CAJAS POR EMBALAJE