

MÁSCARA DE ANESTESIA CON VÁLVULA TRASERA

Descripción del producto

- Las máscaras de anestesia están destinadas a suministrar gas anestésico a los pacientes.
- Adicionalmente las máscaras de anestesia también se pueden utilizar para suministrar aire y/o oxígeno.

Características generales

- Máscara de anestesia con válvula antirretorno trasera.
- Conector DI 22mm.
- Los anillos de gancho están codificados por colores.
- El colchón de aire asegura un ajuste facial cómodo.
- La almohadilla de aire y la cubierta están fabricadas en PVC.
- La válvula de retención fabricada en PVC/POM/silicona/SUS304.
- El anillo de gancho fabricado en Q-Resina.
- Sin látex ni DEHP. Libre de ftalatos.
- Certificado CE0197, directiva MDD 93/42/EEC.
- Clasificación clase IIa.



Precauciones y advertencias

- Este producto no puede ser utilizado en pacientes con traumatismo facial y alergia al PVC.
- Este producto está diseñado para un solo uso y no está destinado a ser reprocesado.
- La reutilización, remojo, enjuague o esterilización de este dispositivo con productos químicos puede dejar residuos nocivos e impedir el correcto funcionamiento de este dispositivo.
- La reutilización de un dispositivo de un solo uso para un paciente también puede aumentar el riesgo de contaminación cruzada.
- Este producto debe ser utilizado por personal cualificado.
- No utilizar si el empaquetado está dañado.
- Garantizar que todas las conexiones son seguras.

Condiciones de almacenaje y transporte

- Conservar en su embalaje original hasta su uso.
- Almacenar en un ambiente cuya humedad relativa esté entre 40% y 95%.
- El ambiente debe mantenerse seco, libre de gases corrosivos y en condiciones ventiladas y limpias.
- Evite la exposición directa a la luz solar.

Instrucciones de uso

- Ajuste la almohadilla de las máscaras de anestesia con una jeringa (solo para la máscara con válvula de retención). Revisa a almohadilla presionándola suavemente con la mano.
- Coloque primero la almohadilla de la máscara en la barbilla del paciente, enrolle la almohadilla hacia arriba de la cara con una presión suave pero firme.
- El anillo del gancho de color, se puede usar junto con una correa para la cabeza o quitarse cuando no se necesite.
- Conecte la máscara de anestesia al dispositivo.

Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando, se cumplan las condiciones de almacenamiento.

COLK00001	Máscara Anestesia con Válvula Trasera. Estéril. Pediátrica Talla 2. Color Amarillo.	1 UD. POR BOLSA 200 BOLSAS POR EMBALAJE
COLK00002	Máscara Anestesia con Válvula Trasera. Estéril. Adulto S Talla 3. Color Verde.	1 UD. POR BOLSA 150 BOLSAS POR EMBALAJE
COLK00003	Máscara Anestesia con Válvula Trasera. Estéril. Adulto M Talla 4. Color Rojo.	1 UD. POR BOLSA 100 BOLSAS POR EMBALAJE
COLK00004	Máscara Anestesia con Válvula Trasera. Estéril. Adulto L Talla 5. Color Azul.	1 UD. POR BOLSA 100 BOLSAS POR EMBALAJE