

MASCARILLA DE OXÍGENO CON RESERVORIO

Descripción del producto

- Dispositivo médico desechable usado para administrar oxígeno.
- Se puede utilizar para terapias de atomización y aplicación de medicamento.
- Elaborado de forma anatómica, cubre la nariz y la boca por debajo de la barbilla del paciente.
- Poseen elástico de sujeción para una colocación más cómoda.
- Con lámina de aluminio nasal para un mejor ajuste.
- No estéril.

Características generales

- Mascarilla de oxígeno con reservorio.
- La mascarilla, la bolsa reservorio, el tubo de oxígeno y el tubo conector para la entrada de oxígeno están fabricados en PVC transparente de grado médico.
- El interfaz de reservorio está fabricado en PP. La ventilación fabricada en silicona. La lámina de ajuste nasal fabricada en aluminio y la sujeción elástica fabricada en látex/elastano.
- Color verde transparente.
- Tubo anti-aplastamiento de 2m, garantiza el seguimiento de oxígeno incluso si el tubo se dobla.
- La conexión de los componentes es firme, ejerciendo una tensión estática de 15N durante 15s no produce desprendimiento, rotura o aflojamiento.
- Certificado CE0123, directiva MDD 93/42/EEC.
- Clasificación clase IIa.



Precauciones y advertencias

- Asegurar que todas las conexiones estén firmes y que el aire circule libremente a través del tubo.
- Utilizar el dispositivo con la supervisión de personal cualificado cuando se conecte a una máquina de suministro de oxígeno.
- Una vez abierto, utilizar inmediatamente.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo.

Instrucciones de uso

- Conecte el tubo de suministro de oxígeno a la fuente de oxígeno y ajuste el flujo deseado.
- Compruebe que haya flujo de oxígeno en todo el dispositivo.
- Comprobar el buen funcionamiento de las válvulas. La válvula situada entre la mascarilla y el depósito debe subir durante la inspiración y bajar durante la exhalación. Las válvulas ubicadas en la superficie externa de la mascarilla deben abrirse durante la exhalación.
- Explique al paciente el procedimiento y ajuste la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente.
- Pase la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tire de sus extremos hasta que la mascarilla quede bien adaptada en la cara.
- Presione el clip nasal para moldearlo al contorno de la nariz del paciente. Con ello se evitan fugas de oxígeno hacia los ojos y hacia las mejillas.

Condiciones de almacenaje y transporte

- Conservar en su embalaje original hasta su uso.
- Almacenar en un ambiente cuya humedad relativa sea menor al 80%.
- El ambiente debe mantenerse seco, libre de gases corrosivos y en condiciones ventiladas y limpias.
- Evite la exposición directa a la luz solar.

Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

COLK00007

Mascarilla Oxígeno con Reservorio Pediátrica M.

1 UD. POR BOLSA 100 BOLSAS POR EMBALAJE

COLK00008

Mascarilla Oxígeno con Reservorio Adulto L+.

1 UD. POR BOLSA 100 BOLSAS POR EMBALAJE