

# VÍA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL

## Descripción del producto

- El tubo de Guedel ó cánula de mayo es un dispositivo que se utiliza para crear una vía de paso de aire entre la boca y la pared faríngea posterior. Resulta útil cuando la lengua y/o la epiglotis caen hacia atrás contra la faringe posterior en pacientes anestesiados o inconscientes, obstruyendo el flujo de aire.
- Fabricado en PE médico semirrígido no tóxico, con el fin de proteger los tejidos.
- Poseen un refuerzo en el bloque de mordida en PP, codificado en colores para facilitar la identificación, y evita morder hacia abajo y protege del bloqueo de las vías respiratorias.
- No contienen látex ni ftalatos en su composición.

## Características generales

- Cánula semirrígida con terminal rígido, con forma curvada para facilitar que se mantenga en su posición dentro de la cavidad bucal.
- El terminal tiene en su interior una pieza de color que indica el calibre máximo que se puede utilizar y la medida del tubo Guedel. Azul talla 00, negro talla 0, blanco talla 1, verde talla 2, amarillo talla 3, rojo talla 4.
- Sellado suave sin impurezas, fuerza de despegado superior a 1,5N. Esterilizado OE. Valor residual EO  $\leq 10\mu\text{g/g}$ .
- Sellado suave sin impurezas, fuerza de despegado superior a 1,5N.
- Esterilizado OE. Valor residual EO  $\leq 10\mu\text{g/g}$ . Certificado CE0123, directiva MDD 93/42/EEC.
- Clasificación clase IIa.



## Precauciones y advertencias

- Si el paciente tiene un reflejo nauseoso puede vomitar.
- Si la cánula es demasiado grande, puede cerrar la glotis y, por tanto, las vías respiratorias.
- Un tamaño inadecuado puede provocar hemorragias en las vías respiratorias.
- Producto de un solo uso.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo.

## Instrucciones de uso

- Elegir el tamaño adecuado, que debe coincidir con la distancia que haya entre la comisura bucal y el ángulo de la mandíbula.
- Para su colocación debe realizar una hiperextensión cervical, abriendo la boca de la víctima con los dedos índice y pulgar de la mano que no sujeta la cánula, y procediendo seguidamente a introducir ésta, rotada 180°, es decir, la parte cóncava dirigida hacia el paladar, girándola progresivamente según se va introduciendo en la boca hasta dejarla en su posición definitiva, evitando en todo momento desplazar la lengua hacia atrás.
- Una vez ubicada, deberá comprobar su permeabilidad, realizando insuflaciones y comprobando si se desplaza el tórax de la víctima.

## Condiciones de almacenaje y transporte

- Conservar en su embalaje original hasta su uso.
- Almacenar en un lugar seco.
- Condiciones ambientales: máximo 30°C (86°F) de temperatura y 70% de humedad relativa.
- Conservar en lugar oscuro.

## Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

**COLK0009**

Vías Orofaringeas Tipo Guedel Talla 0. Estéril.

50 UDS. POR CAJA 10 CAJAS POR EMBALAJE

**COLK0010**

Vías Orofaringeas Tipo Guedel Talla 1. Estéril.

50 UDS. POR CAJA 10 CAJAS POR EMBALAJE

**COLK0011**

Vías Orofaringeas Tipo Guedel Talla 2. Estéril.

50 UDS. POR CAJA 10 CAJAS POR EMBALAJE

**COLK0012**

Vías Orofaringeas Tipo Guedel Talla 3. Estéril.

50 UDS. POR CAJA 10 CAJAS POR EMBALAJE